

Gebruiksaanwijzing

Rollatorrek t.b.v. Gemino

Art.nr.: S120 472

Zorg ervoor dat de vergrendelbeugel staat zoals in afbeelding 1 is weergegeven. (of volledig is verwijderd)



Afbeelding 1

Plaats de rollator met de voorwielen links tegen het rollatorrek aan. Hou hierbij de rollator naar links gekanteld. (achterwielen omhoog) Laat de rollator vervolgens in het rollatorrek zakken.



Afbeelding 2

Haal de vergrendelbeugel uit het rollatorrek. Plaats deze nu terug zodat het rubber tegen de rollator zit. Duw deze nu goed aan, en zet de snelspanner vast.



Afbeelding 3

LET OP! MODEL IS GEWIJZIGD. PLATEAU STAAT NU SCHUIN (ROLLATOR DUS OOK).HIERDOOR MINDER BREED! TEVENS HOOGTE EN DIEPTE INSTELBAAR. WERKING IS VERDER GELIJK GEBLEVEN!



Afbeelding 4