

Installatie handleiding S120.334 montageset Trophy 20



Deze montageset wordt op een Trophy 20 gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het wiel van de Trophy. 10 cm voor de aandrijf-as zitten er 2 gaten in het frame (Zie foto onder). Plaats de montagesteun daar overheen. Plaats beide zeskantbouten M8 x 20 mm door het gat van het frame. Bevestig aan de binnenzijde van het frame de borgmoeren en draai vanaf de buitenzijde de zeskantbouten stevig aan. Plaats het wiel met een momentsleutel zoals voorgeschreven door de fabrikant.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl