

Installatie handleiding S120.450 montageset Pride Victory XL130



Deze montageset wordt op een Pride Victory XL130 gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montageset

Draai de Borgmoer van antiekiewiel los en verwijder het antiekiewiel. Monteer de montageplaat door het gat aan de uiteinde van de plaat over de as te schuiven. Draai de plaat omhoog zodanig dat de koker 15/15mm. Verticaal omhoog steekt, Plaats beide inbusbouten M6x35 van binnen naar buiten in de overgebleven gaten van de montageplaat. Zodanig dat deze aan de voor en achterzijde van de antiekiewielgaffel komen. Aan de andere zijde monteert u de schroefplaat waarin de M6x35 inbusbouten vast gezet worden. Plaats nu het Antiekiewiel en draai de bouten en moer goed vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl