



Installatie handleiding S120.192 montageset Logic



Deze montageset wordt op een Logic gemonteerd. Hierdoor kunt u een rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 13mm
- Inbussleutel 8 mm

Plaatsing van de montageset

De montageplaat wordt gemonteerd op de reeds bestaande strip zie foto 1. Plaats de montageplaat aan de buitenzijde van deze strip en steek de beide meegeleverde inbusbouten voorzien van sluitring vanuit de binnenzijde door de montageplaat naar de buitenkant (zie foto 2). Draai op de beide bouten een sluitring en borgmoer.

Draai daarna beide bouten goed vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof **info@wrsnet.nl**