



Installatie handleiding S120.333 montageset Trophy 6



Deze montageset wordt op een Trophy 6 gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het wiel van de Trophy. 10 cm voor de aandrijfjas zitten er 2 gaten in het frame (Zie foto onder). Plaats het opvulstuk op de wijze zoals op de foto te zien is. Plaats daarna montagesteun er overheen. Plaats beide zeskantbouten M8 x 40 mm door de montageplaat, het opvulstukje en het gat van het frame. Bevestig aan de binnenzijde van het frame de schroefplaat en draai vanaf de buitenzijde de zeskantbouten stevig aan. Plaats het wiel met een momentsleutel zoals voorgeschreven door de fabrikant.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.