



Installatie handleiding S120.377 montageset Comet



Deze montageset wordt op een Comet gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 10mm.
- Inbussleutel 5mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het antiekiep wiel van de Comet. Monteer de montageplaat aan de binnenzijde van de antiekiepwiel gaffel (zie foto onder). Plaats de inbusbouten M6 x 45mm in de bovenste gaten. Steek de bouten aan de voor- en aan de achterzijde van de antiekiepwielgaffel. Plaats de klemboutplaat aan de buitenzijde en schroef de M6 borgmoeren er op. Draai vervolgens alle 3 de bouten goed vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl