



Installatie handleiding S120.452 montageset Mezzo



Deze montageset wordt op een Mezzo gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator-/ eifel-/ of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 4
- Inbussleutel 6

Plaatsing van het montage set

Verwijder het wiel van de Mezzo 10 cm voor de aandrijf-as zitten er 2 gaten in het frame (Zie foto onder). Plaats het opvulstuk op de wijze zoals op deze foto te zien is en plaats de montagesteun daar overheen. Plaats beide zeskantbouten M8 x 30 mm door de montageplaat, het opvulstukje en het gat van het frame. Bevestig aan de binnenzijde van het frame de schroefplaat en draai vanaf de buitenzijde de zeskantbouten stevig aan. Plaats het wiel met een momentsleutel zoals voorgeschreven door de fabrikant.



Email ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een email naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl