



Handleiding draadloos noodstopsysteem



Toepassing

U kunt met dit systeem ingrijpen als er een gevaarlijke situatie dreigt. Na bedienen van de afstandsbediening stopt de scootmobiel onmiddellijk. Ideaal voor instructeurs.

Gebruik

Doe de stekker in de laadentree en laat het kastje vrij hangen. De scootmobiel kan nu gebruikt worden. Bij gevaar drukt u op knop A en het middel stopt.

Vrijgeven kan door op knop B te drukken. Vaak moet de scootmobiel zelf ook nog uit/aan worden gezet.

Eerst ingebruikname

Het noodstopsysteem is gemaakt voor 24Volt scootmobielen en rolstoelen, welke voorzien zijn van een 3-polige laadentree. Controleer altijd vooraf of het systeem werkt zoals verwacht. Bij een volle batterij in de afstandsbediening is de reikwijdte 20 meter. Stoorsignalen en andere omgevingsinvloeden kunnen die afstand negatief beïnvloeden. Test daarom altijd op locatie. **Buiten het bereik zal het systeem niet reageren.**

Vragen

Neem bij vragen contact op met uw leverancier. Foto's en uitgebreide beschrijving van het probleem kunnen helpen deze efficiënt op te lossen.

Bewaar deze handleiding bij uw noodstopsysteem