



Installatie handleiding I600.100 Infuuszakhouder



Deze infuuspaaalhouder wordt gemonteerd om een ronde buis van 22mm. Heeft u een buisdiameter van 25mm., dan moeten de klemmen aangepast worden van 22mm. ipv 25mm.

Voor montage op de Sedeo rugleuning is er een aparte montagesteun de I600.120 verkrijgbaar.

Monteer de infuuszakhouder zodanig dat de infuuszak altijd boven de schouder van de belanghebbende komt te hangen.

De installatie van deze infuuspaaalhouder mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 5mm.

Plaatsing van de Infuuspaaalhouder

Neem de montagehouder en monteer de aluminium halve klemschalen tegen elkaar aan op de montageplaat door middel van de meegeleverde bouten

Plaats nu deze montagehouder op de linker rugleuningbuis ongeveer halfverwege de rugleuningbuis met de sterknop aan de onderzijde gemonteerd. Plaats nu het vierkante gedeelte van de verstelbuis in de zo juist gemonteerde kokeropening en vergrendel deze door de sterknop van de montagehouder aan te draaien.

Monteer nu de verchroomde infuuszakbuis in het ronde gedeelte van de verstelbare buis en zet deze op de juiste hoogte.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl