

Installatie handleiding S120.178 montageset Pride Luna



Deze montageset wordt op een Pride Luna gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

-
- steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het antiekiewiel van de kiewielsteun, door de borgmoer los te draaien. Verwijder de as waar het antiekiewieltje op zit. zie foto 1. Plaats daarna de montageplaat aan de buitenzijde van de bumper en steek de onderste bout en de bovenste bout door de vrijgekomen gaten, Steek deze van buitenaf naar het midden zie foto 2. Draai op de bovenste bout de borgmoer en draai op de onderste bout achtereenvolgens een ring, het antiekiewieltje en de borgmoer. Draai beide bouten goed vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl