

Installatie handleiding S120.363 montageset Auriga



Deze montageset wordt op een Auriga gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 10mm.
- Inbus sleutel 5mm.

Plaatsing van de montageset

Neem de aluminium blokken en plaats deze om het verticale gedeelte van de 22mm. bumper plaats de meegeleverde inbusbouten (M6x40) door de aluminium blokken, zodanig dat het schroefdraad naar buiten steekt. Plaats de montagesteun aan de buitenzijde tegen de aluminium blokken en door de vrijgekomen gaten. Plaats de moeren op de bouten en draai deze stevig vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl