



## Installatie handleiding S120.463B montageset Galaxy II met bumper



Deze montagesteunen worden achter op het frame van een Excel Galaxy II gemonteerd. Deze set monteert u aan de antiekiewielsteun. Hierdoor kunt u de rollator- eifel- stokhouder uit het Inova assortiment achterop deze scootmobiel monteren. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

### Benodigd gereedschap:

- Inbusleutel 5mm.
- Steeksleutel 10mm.

### Plaatsing van de montageset

Verwijder het kiewieltje. Neem de montagesteun en de schroefplaat. Schroef de montagesteun en de schroefplaat met de 2 korte inbusbouten op elkaar. Zorg dat er ongeveer 3mm ruimte tussen de beide platen zit.

Let erop dat de vierkante koker 15/15mm verticaal omhoog staat. Schuif de montagesteun aan de buitenzijde van de gaffel en de montageplaat aan de binnenzijde van de gaffel. Zorg dat het boutgat voor het antiekiewiel vrij blijft. Plaats het kiewieltje met de nieuwe langere inbusbout en plaats de borgmoer.



### E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof [info@wrsnet.nl](mailto:info@wrsnet.nl)