



Installatie handleiding S120.459 Excel Exite



Deze montageset wordt op een Excel Exite gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.


Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 10mm.
- Inbussleutel 5mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het antiekiewiel van de wagen

Plaats de montagesteun met de koker 15x15mm verticaal omhoog en aan de buitenkant van de kiewielbeugel. Plaats de driehoekige borgplaat aan de binnenkant de kiewielgaffel. Schroef nu de 2 inbusbouten M6x 8mm door de montageplaat naar de driehoekige borgplaat. Bevestig nu de antiekiewiel met de meegeleverde zeskantbout M6x45mm. Bevestig de bout met het kiewieltje en ZONDER de ringen vanuit het midden van de scootmobiel naar de buitenzijde. Draai de zeskantbout aan zodat de antiekiewiel hand vast zit en het wieltje blijft draaien . Plaats nu de borgmoer op de bout en draai deze goed vast. Draai nu de 2 inbusbouten ook goed vast.

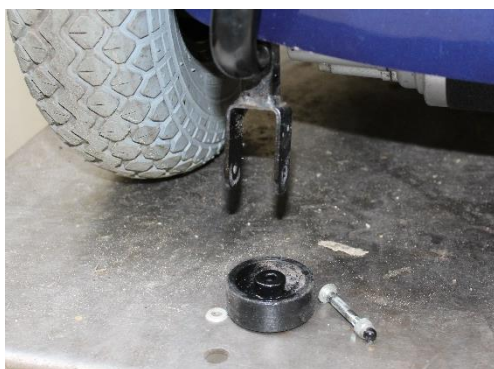

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl