

Installatie handleiding B019.585/B019.586 Eblo stoel.



Deze beensteunontvangst wordt op een Eblo stoel gemonteerd. Deze is geschikt voor onder andere de sterling Elite 2 en de galaxy stoel. Hiermee kunt u de scootmobiel voorzien van een comfortbeensteun. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel 10 mm.

Plaatsing van de montageset.

Neem de stoel van de scootmobiel. Draai deze om en verwijder de voorste montagebouten (zie foto 1). Schuif de beensteunontvangst tussen de stoel en de vergrendelplaat en zorg dat de gaatjes van de beensteunontvangst op dezelfde plek komen waar de schroefjes eerst zaten. Schroef de bouten aan beide kanten weer stevig vast (foto 2). Zet de stoel weer op de scootmobiel.



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl