

Installatie handleiding S120.112 Universele stokhouder



Deze universele stokhouder is voor montage onder de zitting. Deze stokhouder is geschikt voor elke scootmobiel met een koker onder de stoel. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 4 mm.

Plaatsing van de universele stokhouder.

Haal eventueel een vergrendelpin uit de scootmobiel (zie foto 1). U heeft een koker van 25x25mm. voor onder de zitting nodig. Hierin steekt u de L-vormige buis. (zie foto 2). Zorg dat het vierkant in de koker komt zodat het uiteinde waar de stokhouder in bevestigd wordt naar rechts wijst. Draai de L-vormige buis vast onder de zitting met de aanwezige sterknop. Indien deze ontbreekt plaatst u hier een nieuwe zeskantbout. Plaats de stokhouder in het uiteinde van de L vormige buis en draai deze vast met inbusbout 4mm. De stokhouder zit nu vast aan de scootmobiel en beweegt of rammelt niet. Indien u de stokhouder aan de linkerkant wilt hebben kunt u de L-vormige buis naar links laten wijzen. Let op dat deze niet uitsteekt aan de zijkant van de scootmobiel.



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl