

Gebruiksaanwijzing

Rollatorrek t.b.v. ToproTroja 2G

Art.nr.: S120 478

Zorg ervoor dat de vergrendelbeugel er uit is gehaald. Zie afbeelding 1



Afbeelding 1

Plaats de rollator met de voorwielen links tegen het rollatorrek aan. Hou hierbij de rollator naar links gekanteld. (achterwielen omhoog) Laat de rollator vervolgens in het rollatorrek zakken.



Afbeelding 2

Plaats de vergrendelbeugel. Duw deze nu goed aan, en zet de snelspanner vast. Zie afbeelding 3



Afbeelding 3

De rollator zit nu zoals de afbeelding op de scooter. Zie afbeelding 4



Afbeelding 4